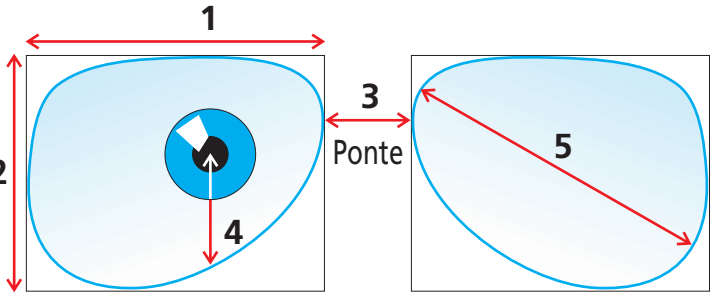




Como tirar corretamente as medidas de uma armação

A tomada de medidas (do cliente e da armação) é de fundamental importância para a confecção de qualquer lente progressiva, inclusive as lentes Hoyalux LifeStyle. Veja abaixo as medidas necessárias e a forma correta de tirá-las.

DNP: Para longe: O.D.: _____mm O.E.: _____mm	Medidas da lente: 	1. Medida HORIZONTAL da lente: _____mm 2. Medida VERTICAL da lente: _____mm 3. Tamanho da ponte: _____mm 4. Medida vertical entre a borda inferior da lente e o centro da pupila (altura pupilar): O.D.: _____mm O.E.: _____mm 5. Maior Diâmetro: _____mm
--	--	--



DNP – Preencha este campo com a distância naso-pupilar de longe do usuário, tirada com o pupilômetro.

1 **MEDIDA HORIZONTAL** – Tire a medida pela parte interna do aro, considerando a maior medida horizontal da lente.

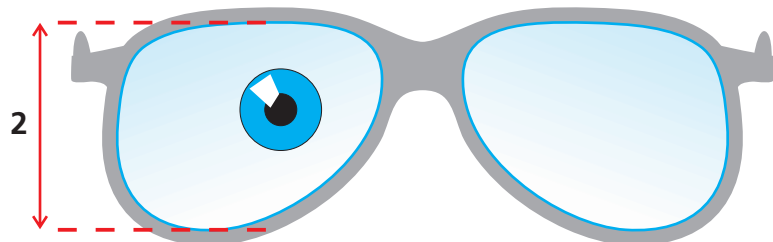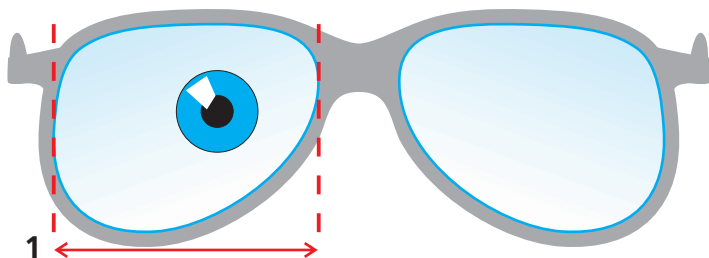

2 **MEDIDA VERTICAL** – Tire a medida pela parte interna do aro, considerando a maior medida vertical da lente.

3 **TAMANHO DA PONTE** – É a menor distância entre as lentes. Considere sempre a medida por dentro do aro.

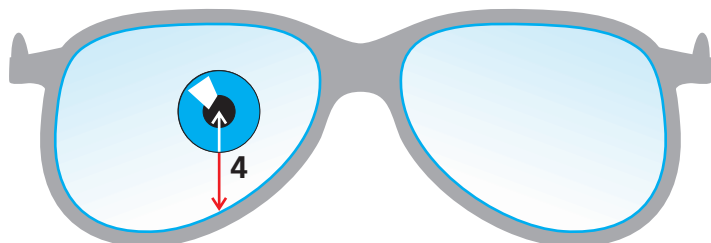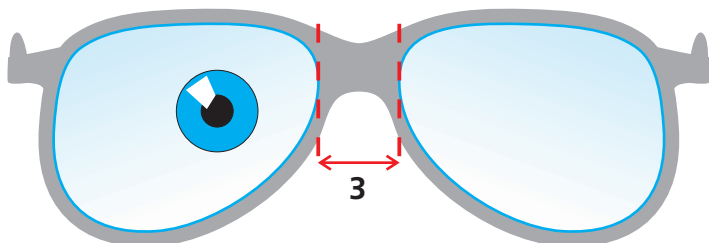

4 **ALTURA PUPILAR** – É a medida entre o centro da pupila do usuário e a borda inferior da lente.

5 **MAIOR DIÂMETRO** – Maior tamanho da lente, independente de sua posição (horizontal ou diagonal).

